


INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO DE MUESTRA

1



Busque un espacio ventilado con acceso a gel hidroalcohólico y papel (p.e., baño o despacho).

2

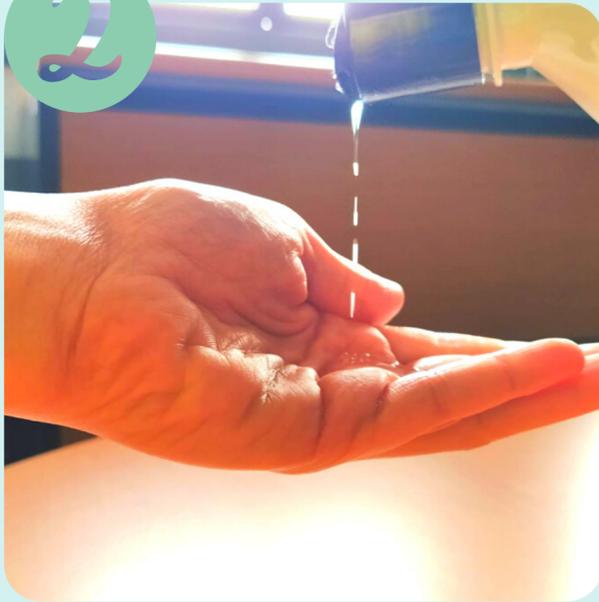

Desinfectese las manos antes de coger el bote.

3



Prepare dos papeles impregnados con gel hidroalcohólico

4



Abra el bote y deje la tapa en una superficie, cogiendo el bote con una mano y liberando la otra.

5



Baje la mascarilla con la mano libre y realice el depósito de saliva en tres tomas

6



Suba la mascarilla cada vez que cierre la boca para producir más saliva.

7




Cierre el bote comprobando que la tapa está bien ajustada, sin tocar la superficie donde se encuentra apoyada la tapa

8



Limpie con el papel impregnado en gel, preparado anteriormente, el bote y la superficie sobre la que han podido caer gotículas de saliva

9

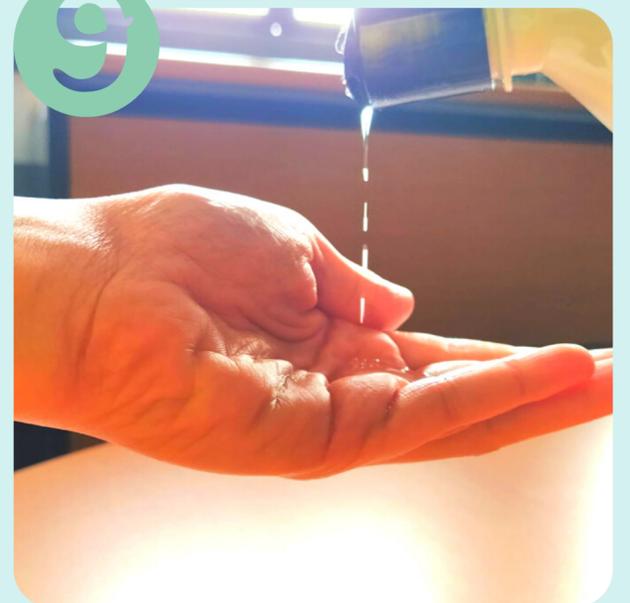

Desinfectese las manos de nuevo